

Thermomètre médical numérique pour l'auto-mesure par voie orale, rectale ou axillaire de la température du corps humain en °C, mode direct

REF 0833

## Mode d'emploi



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne parlez pas, ne courez pas et ne marchez pas pendant la mesure.
- Veillez à ne pas faire tomber le thermomètre. Il ne résiste pas aux coups, ni aux chocs.
- Le thermomètre n'est pas complètement étanche et ne doit donc être immergé dans de l'eau ou une solution désinfectante que jusqu'à la plaque signalétique située à l'arrière.
- Le thermomètre contient des petites pièces (piles, etc.) qui pourraient être avalées par les enfants. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Protégez l'appareil des températures élevées et des rayons directs du soleil.
- N'ouvrez pas l'appareil (excepté pour le changement des piles).
- L'utilisation de l'appareil en dehors des conditions de fonctionnement prévues peut entraîner des mesures inexactes.
- L'utilisation de cet appareil à proximité de téléphones portables, de micro-ondes ou d'autres appareils avec des champs électromagnétiques puissants peut provoquer des dysfonctionnements. Gardez toujours une distance minimale de 3 mètres entre vous et ces appareils.
- Conservez le thermomètre avec le capuchon de protection enfileté.

## POINTS DE MESURE

### Dans l'anus (mesure rectale)

Introduisez avec précaution la pointe de mesure dans le rectum, sur 1 à 2 cm. Durée moyenne de la mesure : 30 secondes.

### Dans la bouche (mesure orale/sublinguale)

N'ingérez pas de boisson ni de repas chaud ou froid dans les 10 minutes (minimum) précédant la mesure. Placez la pointe de mesure dans l'une des deux poches de chaleur situées sous la langue, à gauche ou à droite de la racine de la langue. Fermez la bouche et respirez doucement par le nez. Durée moyenne de la mesure : 60 secondes.

### Sous le bras (mesure axillaire)

La peau doit être parfaitement sèche. Placez la pointe de mesure sous le bras de sorte qu'elle soit en contact avec la peau. Le thermomètre doit être placé à angle droit par rapport au corps. Posez le bras au-dessus de la poitrine de sorte que la pointe de mesure soit plaquée contre la peau. Durée moyenne de la mesure : 3 minutes.

## MESURE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Un signal sonore bref retentit pour signaler que le thermomètre est allumé. Un contrôle optique de tous les segments d'affichage est effectué simultanément. La dernière valeur de mesure s'affiche alors pendant env. 2 secondes avec un petit M (Mémoire). Une valeur test interne de 37,0 °C s'affiche et le thermomètre passe en mode de mesure. Placez le thermomètre à l'endroit choisi. La température est affichée au cours de la mesure et le symbole « °C » clignote constamment sur l'écran. Si la température n'augmente pas de plus de 0,1 °C pendant 16 secondes, un signal sonore retentit. En cas de mesure rectale, ce signal signifie que l'affichage correspond quasiment à la température finale, laquelle ne variera ensuite que très peu. En cas de mesure orale ou axillaire, les durées minimales de mesure doivent être respectées. Pour les températures inférieures à 37,5 °C, un signal sonore normal retentit (10 longues tonalités identiques). Pour les températures supérieures à 37,5 °C, l'alarme de fièvre retentit (30 tonalités courtes, par groupe de 3 tonalités). Lisez la valeur mesurée. Après 10 minutes environ, le thermomètre s'arrête automatiquement. Pour éteindre le thermomètre avant l'arrêt automatique, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La valeur de température déterminée est enregistrée jusqu'à la prochaine mesure.

## CLASSIFICATION DE LA VALEUR DE MESURE

La température corporelle mesurée par voie orale est en moyenne de 36,7 °C ± 0,5 °C. Pour la classification de la fièvre, vous pouvez vous référer aux valeurs indicatives suivantes :

37,5 °C à 37,9 °C : température élevée

38,0 °C à 38,9 °C : fièvre modérée

À partir de 39,0 °C : fièvre élevée

Les températures rectales sont généralement supérieures de 0,5 °C aux températures orales, et les températures axillaires sont généralement inférieures de 0,5 °C aux températures orales.

**Attention : en cas de fièvre élevée, il est absolument nécessaire de consulter un médecin.**

## CHANGEMENT DES PILES

Lorsque le symbole ■ apparaît après un contrôle de segment complet, un remplacement des piles est nécessaire.

- Retirez la vis située à l'arrière du thermomètre et enlevez le couvercle du compartiment à piles du thermomètre.
- Sortez avec précaution le support des piles du boîtier (1 cm environ).

- Utilisez un objet non métallique pour extraire les piles de leur support.
- Installez de nouvelles piles (type LR41, SR41, AG3 ou V392, 1,55 V) en plaçant le signe + vers le haut.
- Faites glisser le support de batterie dans le boîtier. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et fixez-le à l'aide de la vis.

## MESSAGES D'ERREUR

	La température mesurée est inférieure à 32,0 °C et se situe donc en dehors de la plage de mesure.
	La température mesurée est supérieure à 42,9 °C et se situe donc en dehors de la plage de mesure.
	Erreur électronique. Si cette erreur apparaît de nouveau, veuillez vous adresser au Service clientèle UEBE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type :	Thermomètre à maximum, mode direct
Points de mesure/ points corporels de référence :	rectal, oral, axillaire
Plage de mesure :	32,0 °C à 42,9 °C
Précision :	± 0,1 °C
Conditions de fonctionnement :	Température ambiante : 10 à 40 °C, humidité relative entre 30 % et 85 %
Conditions d'entre- posage et de transport :	Température ambiante : -10 à 60 °C, humidité relative entre 25 % et 90 %
Piles :	Type LR41, SR41, AG3 ou V392, 1,55 V
Durée de vie des piles :	2 ans
Classification IP :	IP 22 : protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm, pro- tection contre les projections d'eau

## ÉLIMINATION



Les piles et les équipements techniques usagés ne font pas partie des ordures ménagères et doivent être déposés dans les centres de collecte ou d'élimination prévus à cet effet.

## CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES

Il est généralement recommandé de procéder à un contrôle métrologique tous les 2 ans. En Allemagne, les utilisateurs professionnels sont tenus à ce contrôle conformément au « décret d'exploitation des dispositifs médicaux ». Celui-ci peut être réalisé par UEBE Medical GmbH, une autorité compétente en métrologie ou par des services de maintenance agréés. Veuillez respecter vos directives nationales.

© Copyright 2022 UEBE Medical GmbH. Toute reproduction interdite, même par extrait. Toutes modifications techniques réservées.

## NETTOYAGE

Nettoyez le thermomètre avant et après chaque utilisation avec un chiffon doux et de l'alcool isopropylique dilué avec de l'eau ou de l'eau savonneuse froide. Le thermomètre n'est pas complètement étanche et ne doit donc être immergé dans de l'eau ou une solution désinfectante que jusqu'à la plaque signalétique située à l'arrière. Ne stérilisez pas l'appareil à l'eau bouillante, au gaz ou en autoclave.

## EXPLICATION DES SYMBOLES



Ce produit est conforme à la Directive 93/42/EWG du Conseil du 5 septembre 2007 relative aux dispositifs médicaux et porte le marquage CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).



Degré de protection contre les décharges électriques : type BF



Respecter le mode d'emploi



Numéro de lot



Fabricant

## GARANTIE

Pendant la durée de la garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, nous nous engageons à remédier, selon notre choix et à nos frais, aux défauts décelés, soit par une réparation dans notre usine, soit par le remplacement de l'appareil défectueux. Les frais de retour de l'appareil en usine sont pris en charge par l'expéditeur. Les réclamations non affranchies ne seront pas acceptées par UEBE. La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure normale des pièces, les dégâts causés par la non observation des consignes, la manipulation inappropriée (bris, piles usagées) ou le démontage de l'appareil par l'acquéreur. Sont en outre exclus de la garantie les demandes d'indemnisation à notre encontre.

Les réclamations sous garantie ne sont valables que pendant la période de garantie et sur présentation du bon d'achat. En cas de réclamation sous garantie, retourner l'appareil accompagné du bon d'achat ainsi que d'une description du vice à : UEBE Medical GmbH, Service Center, Bgm-Kuhn-Str. 20, 97900 Kulsheim, Allemagne. Les droits et prétentions légaux de l'acquéreur à l'encontre du vendeur, (réclamations pour défaut, responsabilité du producteur, etc.) ne sont pas limités par cette garantie.

**Remarque : pour une réclamation sous garantie, n'oubliez pas de joindre le bon d'achat.**



UEBE Medical GmbH  
Bgm-Kuhn-Str. 22  
97900 Kulsheim  
Allemagne

info@uebe.com  
www.uebe.com



Germany est.1890